


*Make your life healthy  
and beautiful every day!*

# Massaažitool

## AL-8900S

### Kasutusjuhend

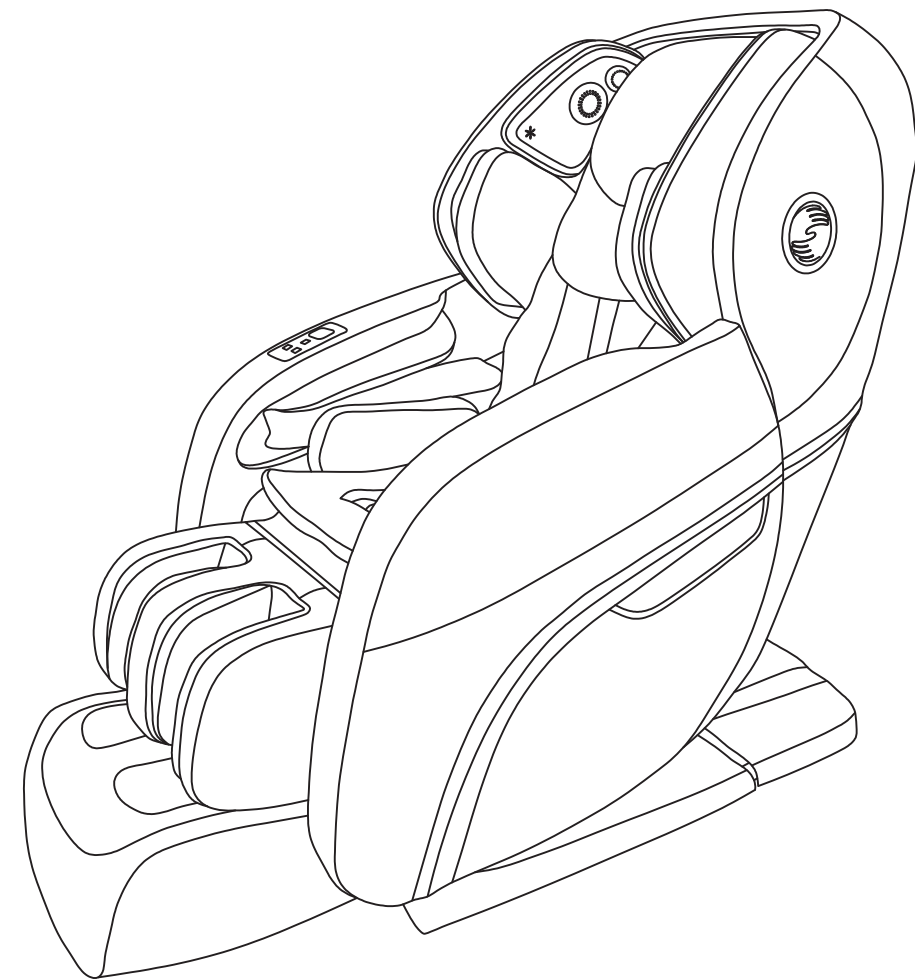

Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

## Massaažitool

### AL-8900S

# Funktsioonide tutvustus

1. Sellel riiklikult patenteeritud 4D massaažitoolil on tagaosas painduv ja kiikuv massaažimehhanism, mille abil võimaldab tool masseerida selga muljumise, õrna ja tugevama koputamise, shiatsu ja kiire hõõrumise meetoditel, tekitades inimkätega teostatava pigistamise efekti, mis tagab lõõgastava massaaži kogu kehale.
2. Massaažitoolil on ka soojendusfunktsioon, mille abil saab pakkuda soojusteraapiat kaelale, õlgadele, vöökohale ja tuharatele, leevendada valu ja parandada vereringet.
3. Eriti pikk L-kujuline rööbastega raam tagab selle, et massaažirullikud liiguvad tooli ülaosast kuni reiteni välja, teostades massaaži kogu kehale mistahes nurga alt.
4. Kuna tooli korpus tooli lamavasse asendisse liigutamisel praktiliselt tahapoole ei nihku, saab tooli ruumisäästlikult paigutada seina lähedale – tänu vähesele ruumivajadusele saate massaaži nautida näiteks ka kodus.
5. Lamamisasendisse saab tooli liigutada vaid ühe nupuvajutusega ning nullgravitatsiooni funktsioon aitab tõhusalt leevendada pinget selgroole ja liigestele – nautige füüsilist ja vaimset lõdvestust. Ülestõstetud jalatugi asub veidike kõrgemal kasutaja südame asukohast allalastud seljatoel, mis tagab aju parema hapnikuga varustatuse.
6. Mugav juhtmevaba tehnoloogiaga kaugjuhtimispuult, millel on värviline LCD-ekraan, kuhu kuvatakse reaajas massaažiasend, tehnikad ja olek ning mille abil saab massaažiprogrammi vastavalt kasutaja soovil kohandada.
7. Bluetooth tehnoloogia abil ühildub tool mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja muude mobiilseadmetega, mistõttu saab massaaži ideaalselt juhtida juhtmevabalt läbi rakenduse.
8. Juhtmevaba Bluetooth-pleier kohandub teostatava massaažiga, aidates muusika abil leevendada vaimset väsimust.
9. Innovatiivne jalgade muljumise tehnoloogia, mis leevendab jalavalu, parandab jalgade tervist ja elujõudu.
10. Kõiki jalaosasid hõlmav rull- ja õhusurve-massaaž stimuleerib rullikute soojendusfunktsiooni abil jalgade refleksioonitsoone.
11. Õhusurvega teostatav pigistusmassaaž käsivartele, mis parandab vereringet kapillaarides.
12. Massaažitoolil on mitu komplekti õhkpatju vöökoha ja puusade piirkonnas, mis katavad täielikult vöökoha, puusade ja reite piirkonna ja mille abil saab teostada vaheldumisi erinevatele piirkondadele teostada õhusurve-pigistusmassaaži, mis vähendab tõhusalt üldist väsimust.
13. Jalatuge saab pikendada ja lühendada 22 cm ulatuses, mistõttu sobib tool erineva pikkusega inimestele.
14. Ionisaatori õhupuhastustehnoloogia tõmbab endasse õhus olevad kahjulikud ained ja parandab õhu kvaliteeti.
15. Nutikas hääljuhtimistehnoloogia võimaldab kasutajal nautida veelgi mugavamat massaaži.

- ★ 1. Täname, et olete valinud massaažitooli AL-8900S. .
- 2. Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- 3. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.
- 4. Järgige hoolega kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

- ★ Märkus: Tootja jätab endale õiguse toote disaini teatamata muuta. Kasutusjuhendis toodud pildid on vaid illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.



## Sisukord

Ettevalmistus	Ohutusjuhised .....	1
	Konstruksiooni välimised osad .....	5
	Konstruksiooni sisemised osad .....	6
	Mehaaniliste komponentide diagramm .....	7
	Mehaaniliste komponentide nimekiri .....	8
Paigaldamine	Paigaldamine .....	9
Massaaž	Reguleerimine enne massaaži .....	15
	Manuaalne juhtimine .....	17
	Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid .....	23
	Pärast massaaži .....	26
Hooldus	Puhastamine ja hooldus .....	27
Muu	Veotsing .....	28
	Tehnilised andmed .....	29





Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.

- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, kuna see aitab tagada massaažitooli õige paigaldamise ja kasutamise.
- Ohutusjuhiste all on toodud oluline ohutusteave, mis on märgitud sümbolitega „Hoiatus“ ja „Ettevaatust“.

Mõlema sümboli juures on toodud oluline ohutusteave, mida tuleb hoolega järgida.

 <b>Hoiatus</b>	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasnedda surma või vigastuste oht.
 <b>Ettevaatust</b>	Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasnedda vigastuste või kahjustuste oht.







### Sümboli tähendus

	Keelatud tegevus.		Seadme demonteerimine on keelatud.
	Järgige tööjuhiseid.		Juhtme õige kasutamine.

- Järgnev teave tuleb tuleviku tarbeks alles hoida.




### Hoiatus

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteoporoosiga isikud</li> <li>• Südamehaiged, sh südamestimulaatori või mu meditsiinilise kehasisese elektroonikaseadmega isikud.</li> <li>• Rasedad ja isikud, kes ei ole terved, peaksid enne tooli kasutamist konsulteerima arstiga.</li> <li>• Ärge kasutage tooli, kui teil esineb nahakahjustusi.</li> <li>• Palavikuga isikutel on keelatud tooli kasutada.</li> <li>• Tajuhäiretega isikutel on keelatud tooli kasutada.</li> <li>• Üle 80-aastastel isikutel on keelatud tooli kasutada.</li> <li>• Lapstel ja alkoholi mõju all olevatel isikutel on keelatud tooli kasutada.</li> <li>• Ärge jääge toolis magama.</li> <li>• Ärge kasutage tooli, kui teie keha on märg.</li> <li>• Soojuse suhtes tundlikud või allergilised inimesed peavad tooli kasutamisel olema ettevaatlikud või loobuma tooli kasutamisest.</li> </ul>	Tools kasutamiseks sobimatud isikud
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et tooli selja- ja jalatoe üles või alla liigutamisel ning jalatoe pikendamise või lühendamise ajal ei oleks tooli ümber (all, taga või ees) lapsi, lemmikloomi ega esemeid.</li> <li>• Kui tunnete end massaažitooli kasutamise ajal ebamugavalt, lõpetage tooli kasutamine kohe ja konsulteerige arstiga.</li> <li>• Ärge masseerige pead liiga tugevalt.</li> <li>• Ärge kasutage tooli kõhu ega põlvede masseerimiseks, olge kaelamassaaži ajal ettevaatlik. Ärge laske lastel ega lemmikloomadel tooliga mängida, eriti siis, kui tool töötab. Tooli selja- ja käetugedel on seismine keelatud.</li> <li>• Liikumiskahjustega inimesi või inimesi, kes ennast väljendada ei saa, tuleb massaaži ajal rangelt ja kogu aeg jälgida.</li> </ul>	Õnnetused/vigastused
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisestage tooli toitepistik sobivasse ja töökorras olevasse seinakontakti. Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud, et vältida lühise tekkimise ohtu.</li> <li>• Kui tooli ei kasutata, lõpetage massaažiprogrammid ja lülitage seade sisse- ja väljalülitamise lülitist välja ning tõmmake pistik seinakontaktist.</li> </ul>	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massaažitooli on keelatud kasutada, kui tooli ventilatsiooniavad on blokeeritud.</li> <li>• Tooli massaažipatju ei tohi hoiustamiseks kokku voltida.</li> <li>• Tooli ei tohi lasta tühjalt pikka aega töötada.</li> </ul>	Õnnetused
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katkisi ja liiga lõdvalt ühenduvat toitejuhet, pistikut ega seinakontakti ei tohi kasutada.</li> <li>• Tulekahju, elektrilöögi ja tooli kahjustuste vältimiseks ärge kasutage muid elektriliseid kui ainult nimipinget.</li> <li>• Toitejuhet ei tohi kasutada, kui see on katki, modifitseeritud, sõlmes, väändunud või raske koorma all muljuda saanud.</li> </ul>	Tulekahju ja elektrilöögi oht
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui massaažitool ei tööta korralikult või on katki, sellele on sattunud veepritsmeid või kukub see vette, laske tool professionaalil korda teha või saatke tool tootja poolt volitatud remonditöökotta. Tooli modifitseerimine, demonteerimine ja hooldusremondi teostamine on keelatud.</li> <li>• Kui tooli toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge asendage seda ise, vaid võtke pistiku asendamiseks ühendust tootja või tootja volitatud edasimüüjaga.</li> <li>• Elektrišoki või vigastuste vältimiseks ärge avage ega demonteerige massaažitooli mistahes osa, kuna toolil ei ole ühtegi osa, mida kasutaja ise hooldama peaks.</li> <li>• Kontrollige, et tooli nahk või kangas ei oleks tooli tagaosas ega mujal katki ega rebenenud. Kui kattematerjal on isegi vaid väike auk, lõpetage kohe tooli kasutamine, tõmmake toitejuhe seinast ja laske kate ära parandada.</li> </ul>	Demonteerimine ja hooldus



## Ettevaatust

!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage massaažitooli tasasel pinnal.</li> </ul>	Ümberkukkumise vältimiseks	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paigutage tool 10 cm seinast eemale, et toolil oleks lamamisasendis liikudes piisavalt ruumi.</li> </ul>	Piisava ruumi tagamiseks	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimaalne soovituslik kasutusaeg on 20 minutit. 5 minutit iga asendi jaoks, alustades kerge massaažiga. Pikk massaaž samas asendis võib põhjustada ebamugavust.</li> </ul>	Liiga pikk massaaž ei ole kehale hea.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne tooli istumist kontrollige vigastuste vältimiseks kogu tool üle ja vaadake, et massaažipunktid oleksid õiges asendis.</li> </ul>	Õnnetuste vältimiseks	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juhtimispuhla tuleks aegsasti panna selleks ettenähtud kotti: ärge pange seda mujale, vältige selle pigistamist või kukkumist.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne pistiku sisestamist toitevõrku veenduge, et toitelüliti on asendis OFF.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage kõik juhtseadised välja, enne kui toitejuhtme seinakontaktist eemaldate.</li> </ul>	Õnnetuste vältimiseks toite sisselülitamisel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.</li> </ul>	Lühiste ja tulekahju ohu vältimiseks	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, et juhtmed ei oleks kahjustunud ning et juhtmetel ei oleks vett ega prahti.</li> <li>Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistiku peab sisendama maandusega seinakontakti, maanduskontakt ei tohi olla väärdunud või ära võetud.</li> </ul> 	Elektrilöögi vältimiseks lekete või rikete tagajärjel		
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge suruge massaažipunkte kätega ega astuge neile peale.</li> <li>Ärge pange käsi töötavate massaažipunktide vahele.</li> <li>Ärge pange käsi ega jalgu tooli mehaaniliste komponentide vahele.</li> <li>Ärge pange ega kinnitage midagi massaažitooli pilusse.</li> <li>Ärge seiske ega istuge selja-, käe- ega jalatoel ning ärge pange nendele mistahes esemeid.</li> <li>Ärge seiske toolil sel ajal, kui see töötab.</li> <li>Ärge liigutage tooli sel ajal, kui see töötab.</li> <li>Ärge tõmmake tooli toitejuhet seinast ega lülitage toidet välja, kui tool töötab.</li> <li>Ärge pange oma käsi või pead jalatoe vahele või selle alla.</li> <li>Ärge kasutage massaažitooli, kui kannate juuksekaunistusi.</li> <li>Enne tuhara- ja puusamassaaži eemaldage taskutest kõvad esemed.</li> <li>Kui tool on lamamisasendis, ärge istuge seljatoel ega suruge sellele.</li> <li>Ärge kasutage massaažitooli paljal nahal või väga õhukeste riietega – õhukesed riided võivad küll aidata saavutada parema massaažiefekti, kuid võivad ka põhjustada nahaärritust või külmakahjustusi.</li> </ul>	Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidke tool eemal kuumusest, niiskusest, teravatest, söövitavatest, süttivatest ja plahvatusohtlikest esemetest.</li> <li>Elektrilise soojendusteki või muude soojendustoodete kasutamine massaažitoolis on keelatud.</li> <li>Ärge paigutage tooli tolmusesse või söövitavat gaasi täis keskkonda.</li> <li>Ärge paigutage tooli väga väikesesse ruumi või kehva õhuringlusega kohta.</li> </ul>	Polstri kulumise või värvuse muutumise ning kõvanenud ja rikunud polüuretaankatte vältimiseks	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidke massaažitoole eemal pliidist või muudest kuumusallikatest.</li> <li>Ärge paigutage tooli otsese päikesevalguse kätte või muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse.</li> </ul>		
	⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge kasutage tooli välitingimustes.</li> </ul>	



## Ettevaatust


⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge kasutage ega hoiustage tooli märjas keskkonnas, näiteks ujumisbasseini lähedal ega vannitoas.</li> <li>Hoidke tool ja kaugjuhtimispuhla kogu aeg kuivana.</li> </ul>	Lekke ja elektrilöögi vältimiseks
⚡	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et maandusjuhe paigaldataks nõuetekohaselt (mittenõuetekohane paigaldus võib põhjustada elektrilöögi. Kui te ei oska juhete ise paigaldada, kutsuge kohale professionaalne elektrik.)</li> <li>Ärge kasutage pistiku adapterit. (Kui komplekti kuuluv pistik ei sobi seinakontakti, ärge vahetage pistikut ise, vaid kutsuge professionaalne elektrik, kes asendab pistiku sellisega, mis sobib seinakontakti.)</li> </ul>	Elektrilöögi vältimiseks
⚡	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne tooli puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.</li> <li>Pärast tooli kasutamise lõpetamist eemaldage see vooluvõrgust.</li> </ul>	Elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui elektrisüsteem on kahjustunud, eemaldage tool vooluvõrgust.</li> <li>Pistiku eemaldamiseks seinakontaktist hoidke kinni pistikut – ärge sikutage pistiku eemaldamiseks juhete.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pärast massaaži lõppemist lülitage tooli toidet välja ja tõmmake pistik seinakontaktist.</li> <li>Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja kohe, kui toimub elektrikatkestus.</li> </ul>	Õnnetuste vältimiseks
		See aitab vältida tooli kahjustusi või õnnetusi siis, kui elekter tagasi tuleb.


## Maandusjuhised

- ✦ ※ Tooli toitejuhtmel on maandus. Pistik tuleb sisestada sobivasse seinakontakti, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja sobib pistikule.



## Kaitsme vahetamine

- ✦ ※ Kui kaitse on läbi põlenud, lülitage seade lülitist välja ning tõmmake toitejuhe seinast. Avage kaitsme peal olev kate, mis asub lülituskarbis. Asendage läbi põlenud kaitse sama suure kaitsmega ja seejärel sulgege kaas. Kaitsme vahetamiseks võib kutsuda ka elektriku.

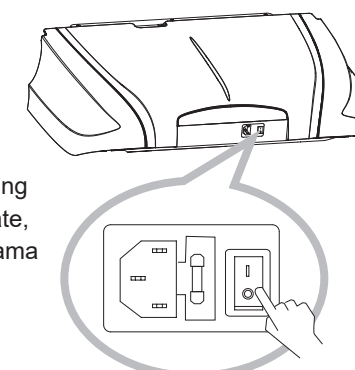


 <p><b>Kohad, kus maandusjuhe ei tohi paikneda</b></p>	<p>Gaasitoru: plahvatus- või tulekahju oht. Telefonijuhe ja piksevarras: elektrilöögi ja tulekahju oht äikese ajal. Veetoru: maandusjuhe on plastmassi juures kasutu.</p>
---	---


## Väliskonstruktsioon

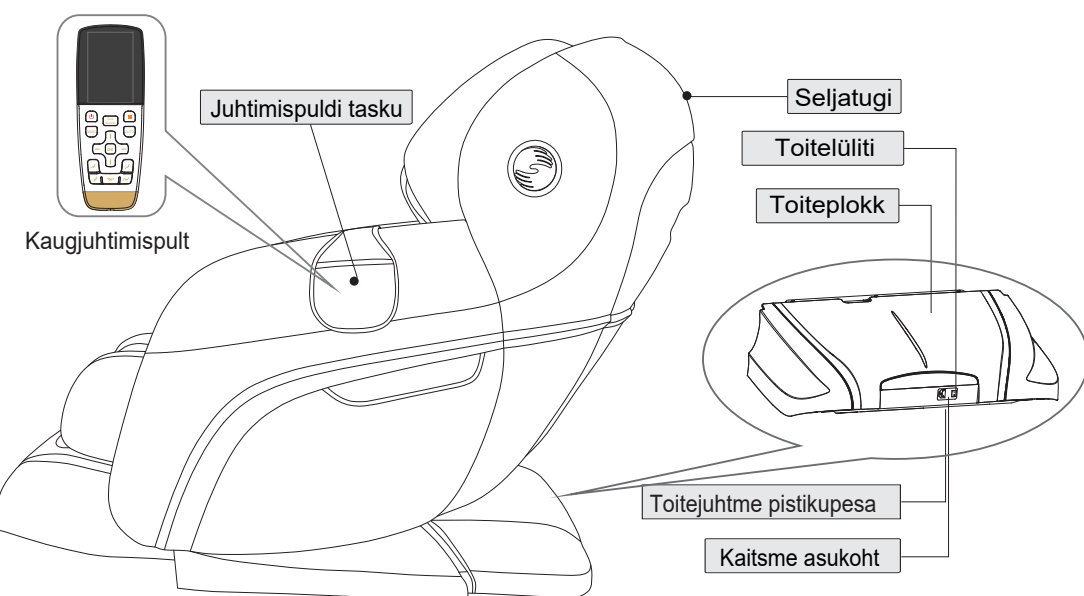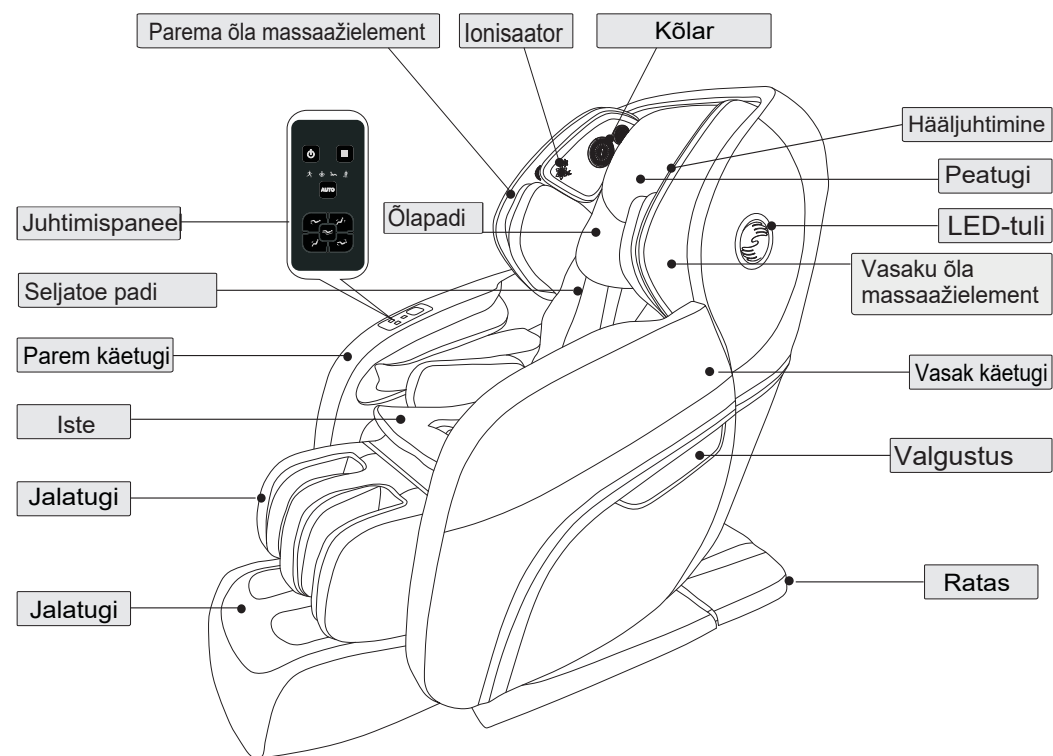

## Sisekonstruktsioon

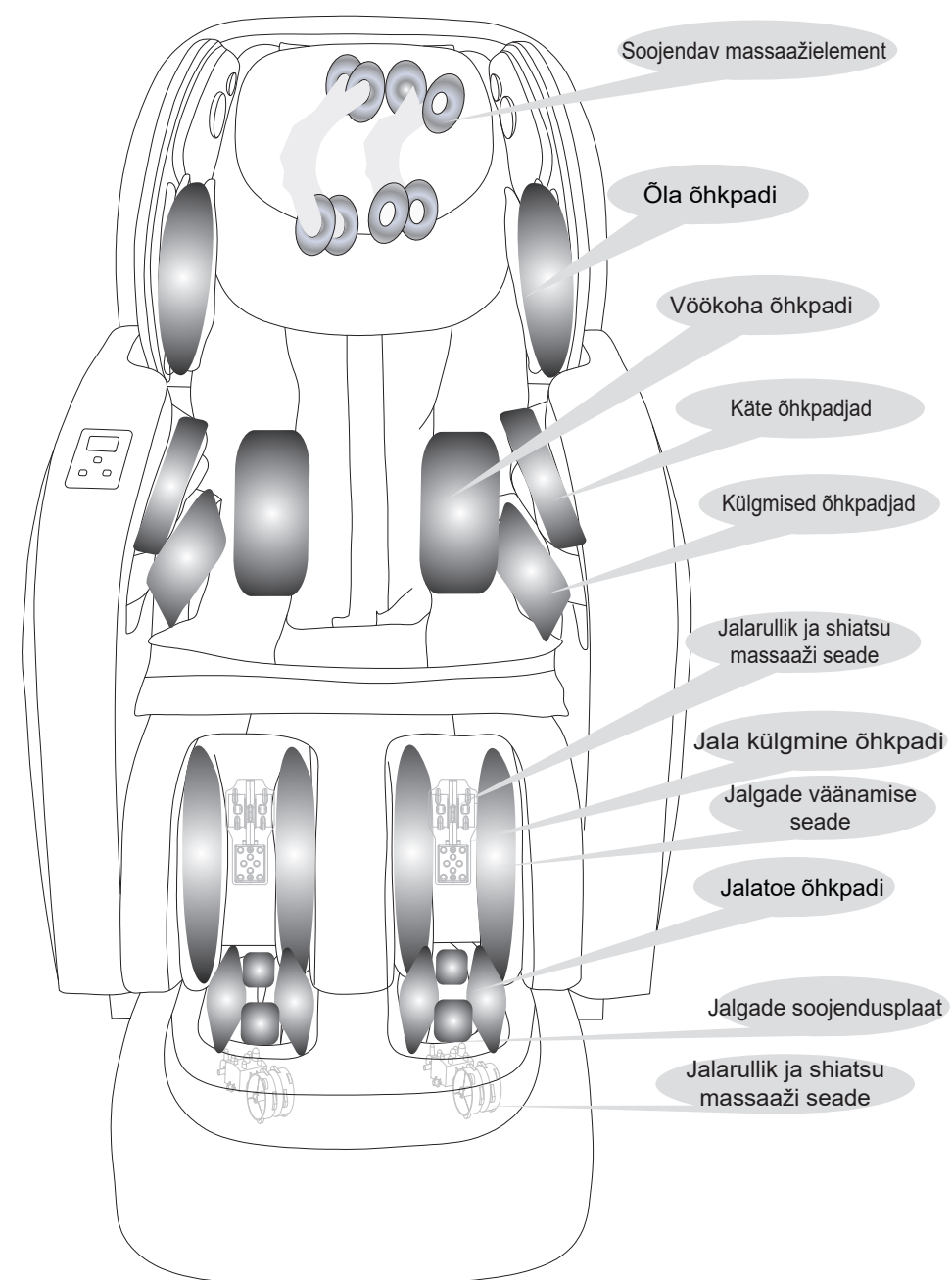

## Koosteskeem

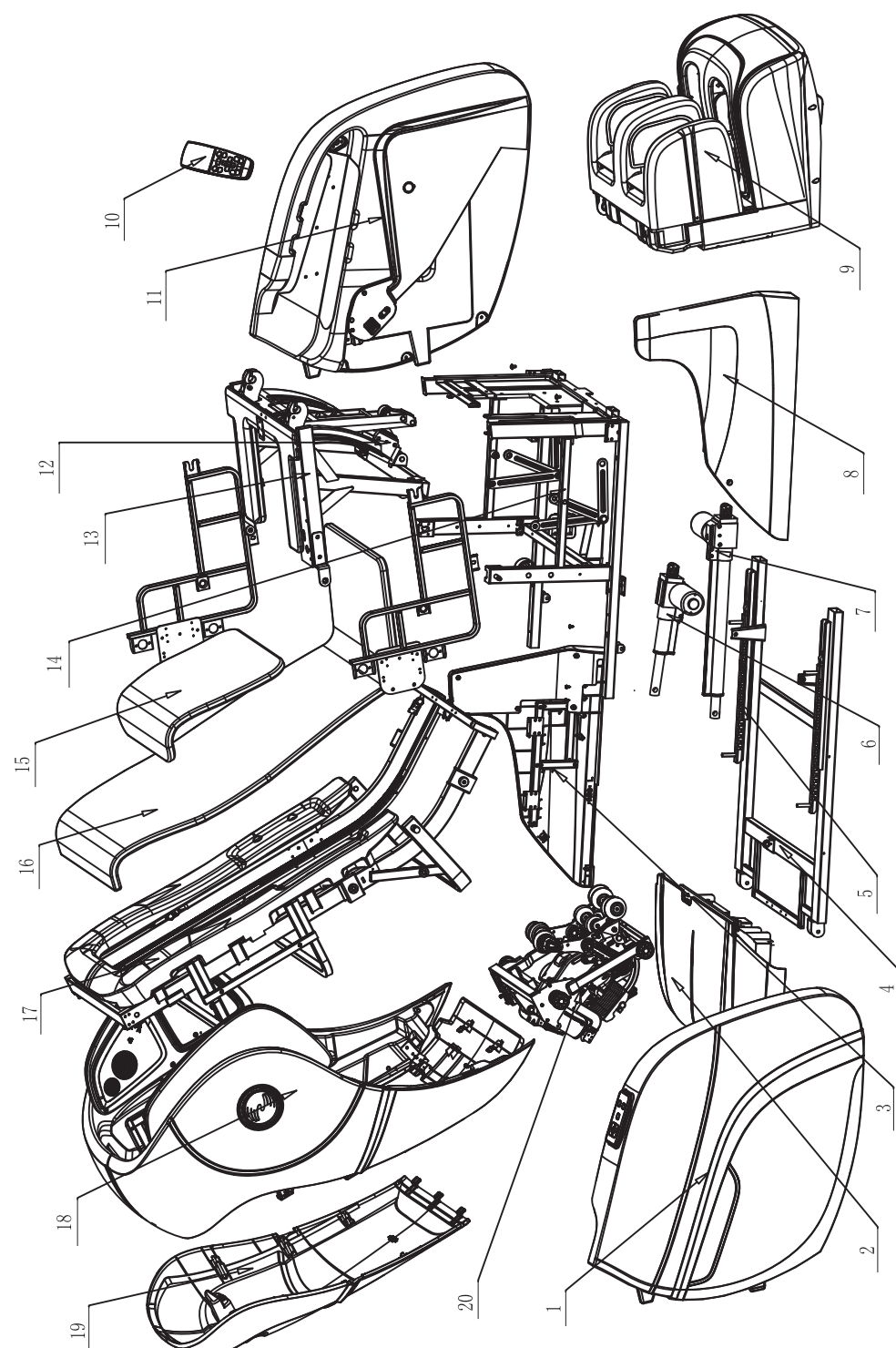

Ettevalmistus

## Mehaaniliste komponentide nimekiri


Nr	Nimetus	Kogus	Nr	Nimetus	Kogus
1	Parempoolne käetoekoost	1			
2	Toiteploki koost	1			
3	Vasakpoolne kate	1			
4	Põhja koost	1			
5	Rööbas	2			
6	Istme elektriline käiviti	1			
7	Seljatoe elektriline käiviti	1			
8	Parempoolne kate	1			
9	Jalakoost	1			
10	Kaugjuhtimispuul	1			
11	Vasaku käetoekoost	1			
12	Jalatoe elektriline käiviti	1			
13	Istmeraami ülemine koost	1			
14	Istmeraami alumine koost	1			
15	Padi	1			
16	Selja- ja istmepadi	1			
17	Seljatoekoost	1			
18	Õlakoost	1			
19	Tagakatte koost	1			
20	Massaažiseade	1			

Ettevalmistus

## Paigaldamine (1)

## 1. Võtke pappkastist välja tooli põhikorpus ja lisatarvikud.

- ① Võtke pappkastist välja lisatarvikute kastid ja tooli korpus, tõstest tooli vähemalt kolmekesi.
- ② Veenduge, et kõik lisatarvikud on olemas.

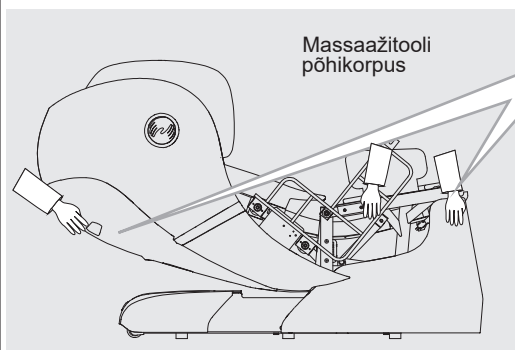


Massaažitooli põhikorpus

Massaažitooli põhikorpuse välja võtmine kastist: kaks inimest võtavad kinni tooli metallraamist paremalt ja vasakult poolt, üks inimene võtab seljatoest.


## Lisatarvikud




Peatugi

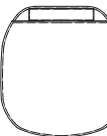

Õlapadi

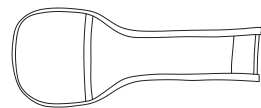


Juhtimispldi kott

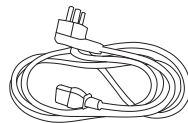

Toitejuhe



Juhtimispld

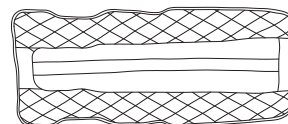


Seljatoe padi




USB-juhe

③ Võtke käetugede kastid välja vasak ja parem käetugi, asetage need lauale või põrandale lapikult maha (vältige kriimustuste teket).

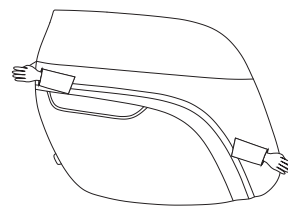


Parem käetugi

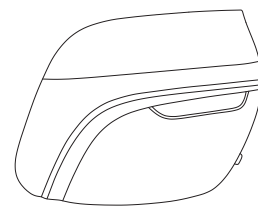

Vasak käetugi

④ Kõige suurema komponendi välja võtmiseks transpordikastist haarake sellest paremalt ja vasakult poolt kinni ja tõstke jalatugi kastist välja.

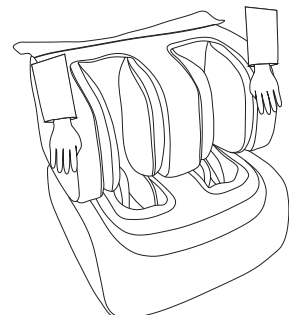


Jalatoe koost

## Paigaldamine (2)

## ● Kontrollige paigalduskohta

- Veenduge, et oleks piisavalt ruumi tooli lamavasse asendisse laskmiseks.

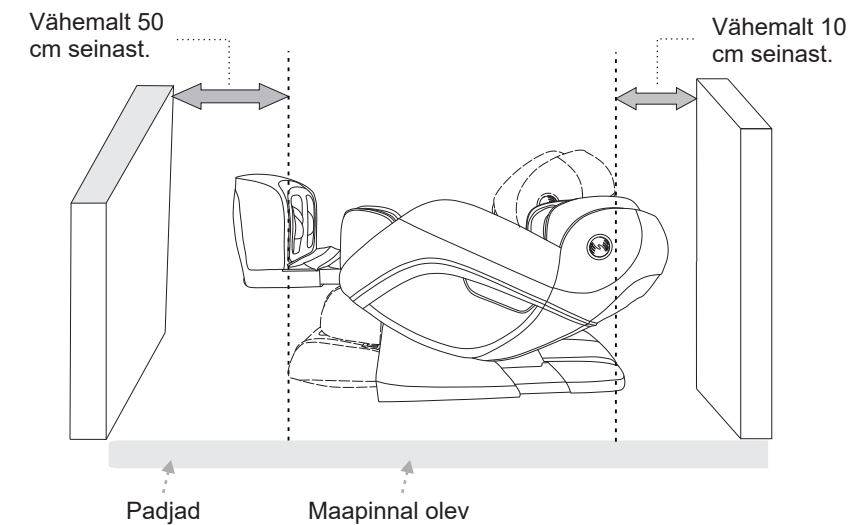

Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põhjustada rikkuda.

## Ettevaatust.


- Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.
- Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või muid ettenägematuid probleeme.
- Tooli polstri deformeerumise vältimiseks ärge kasutage tooli otsese päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.

## Paigaldamine (3)

## 2. Jalatõe koostamine

- ① Kruvige jalatõe kinniti küljes asuv polt lahti.
- ② Ühendage jalatõe õhuvoolik tugevalt tooli korpusel asuvate vastavate õhudüüside külge.
- ③ Ühendage elektrijuhe korralikult pistikusse.
- ④ Tõstke jalatõe kinnitel olev surveplaat üles, tõstke üles jalatugi, asetage pöörlev telg tooli korpusel asuvate kinnitite külge ning lükake surveplaat alla.
- ⑤ Kinnitage jalatugi tugevalt kruviga.
- ⑥ Kinnitage jalatõe kunstnahast osa takjapaelkinnituse abil tooli külge.

**⚠ Hoiatus.** Veenduge, et õhuvoolik ja juhtmed ei oleks kokku keerdunud.

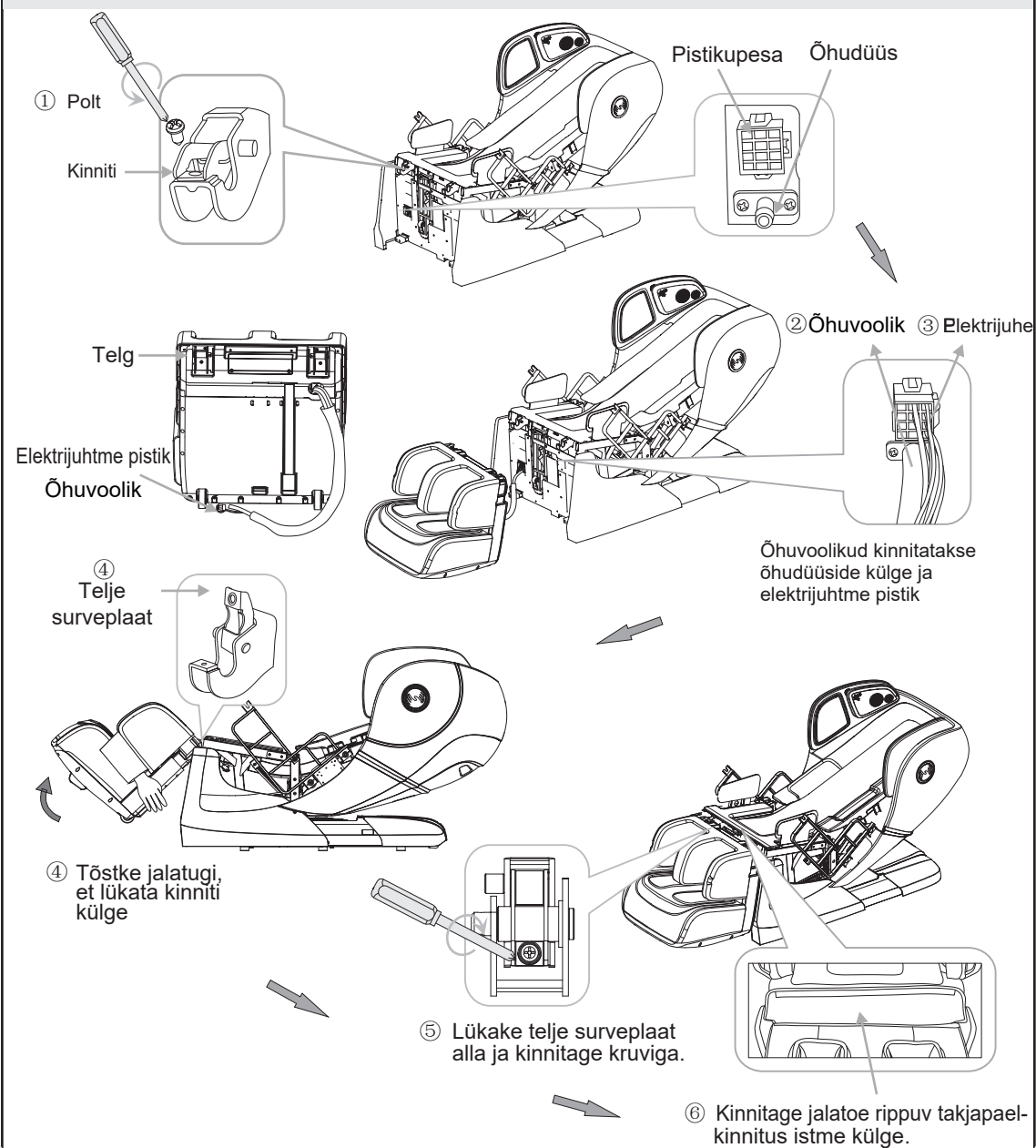


## Paigaldamine (4)

## 3. Vasaku ja parema käetõe paigaldamine

- ① Tõstke käetugi üles ja kinnitage see tooli korpusel asuva pöörleva toe külge.
- ② Ühendage elektrijuhe pistikusse.
- ③ Kinnitage käetõe õhuvoolik tugevalt istmel olevate õhuvoolikutega: must õhuvoolik tuleb kinnitada numbriga 1 tähistatud vooliku külge ning hall õhuvoolik numbriga 2 tähistatud vooliku külge.
- ④ Sisestage käetõe tagaosa fikseerimisplaat tooli korpusel olevasse avasse.
- ⑤ Eemaldage käetõel olev kummikork, sisestage auku kruvi ja pingutage see korralikult, seejärel suruge kummikork tagasi peale.

**⚠ HOIATUS:** Ärge paigaldamise ajal õhuvoolikuid pigistage. See võib põhjustada õhulekke või õhkpatjade mittetäitumise. Veenduge, et surveplaat ja LED-tulede juhe oleksid korralikult kinnitatud, vastasel juhul võib käetugi tooli küljest ära kukkuda või LED-tuled mitte põleda.

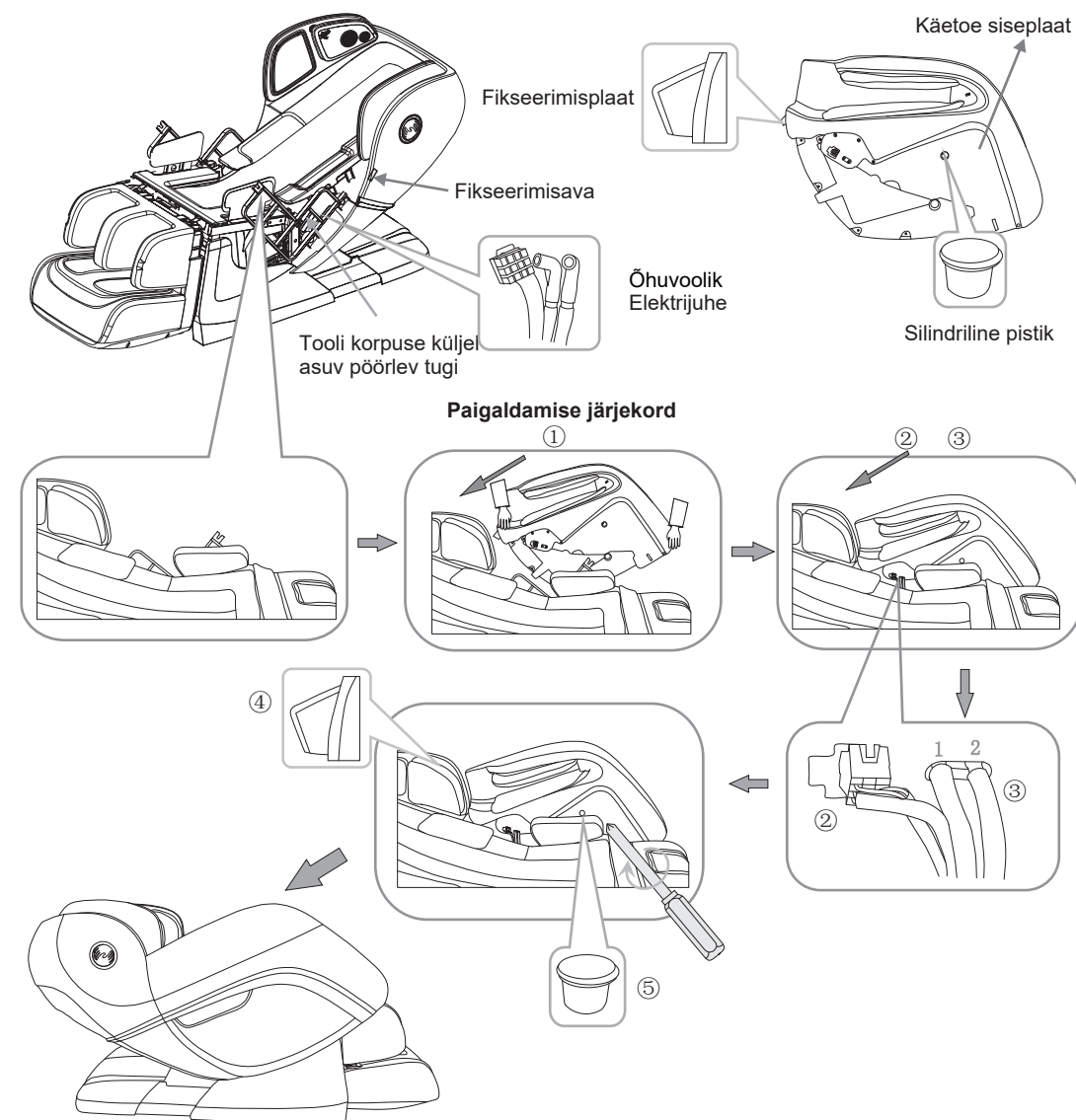




Paigaldamine (5)

4. Seljatoe padja, õlapadja, peatugi ja juhtimispuldi koti paigaldamine

Paigutage seljatoe padi, õlapadi ja peatugi seljatoele ja kinnitage need lukkude ja takjapaelkinnituste abil.

★ Soovitused

Selleks, et tool koguks keha kohta õiged andmed ja tagaks mugava massaaži, joondage tooli istudes peatugi äär oma kõrvadega ning alles seejärel kinnitage peatugi tooli külge.

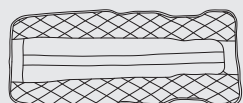


Seljatoe padi





Peatugi



Juhtimispuldi tasku

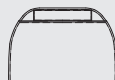

Õlapadi




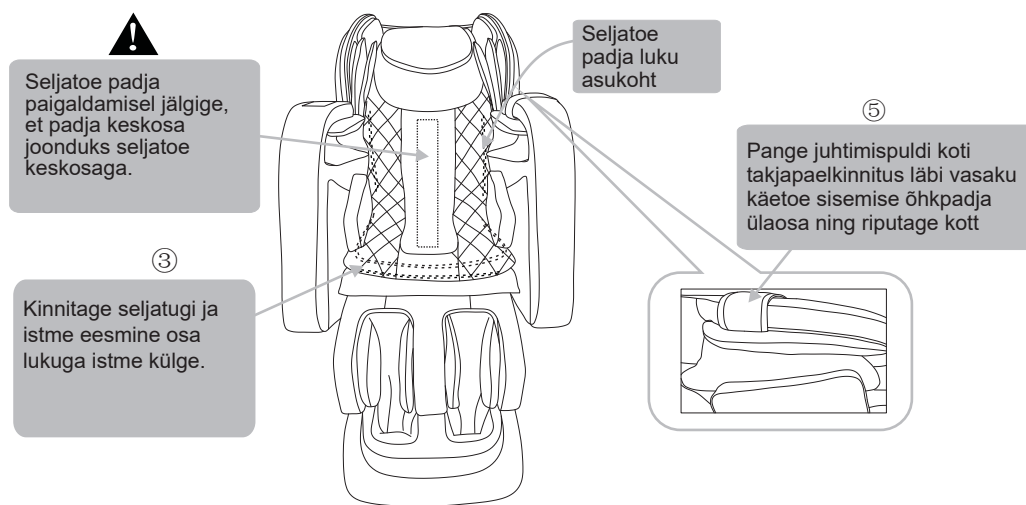
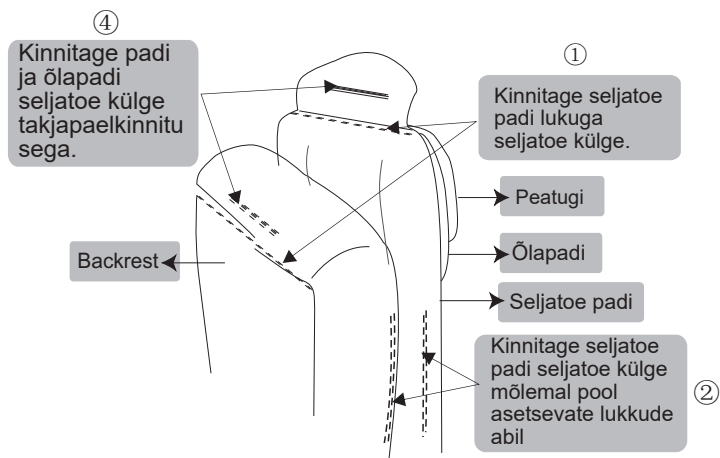


Paigaldamine (6)


5. Pärast tooli koostamist

- 1 Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbil olevasse auku (vt parempoolne pilt).
- 2 Sisestage juhtme teises otsas asuv pistik seinakontakti.
- 3 Lülitage tool lülituskilbi taga olevast nupust sisse. (Lülitage O/I nupust sisse ja välja, sisse lülitamiseks vajutage nupu I märgistusega osa alla.)
- 4 Tooli välja lülitamisel liigub tool tagasi püstisesse asendisse.
- 5 Massaažiprogrammide mugavaks valimiseks kasutage käetoe sisse ehitatud juhtimispaneeli või kaugjuhtimispuldi ning nautige lõdvestavat ja mugavat massaaži.
- 6 Sisselülitatud olekus saab USB-pesa kasutada mobiiltelefoni laadimiseks. Ärge mobiiltelefoni laadimise ajal liigutage. Kui kaugjuhtimispuul ei lähe tööle või on patarei tühjaks saamas, laadige puuliga kaasas oleva USB-juhtmega.

! Veenduge, et lüliti on välja lülitatud, enne kui hakkate tooli toitepistikut seinakontakti sisestama.

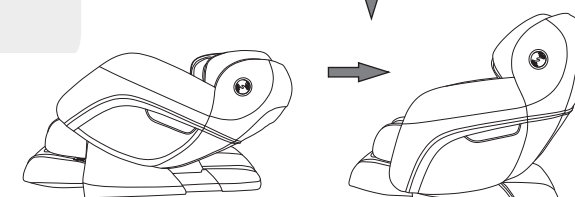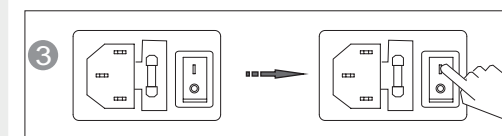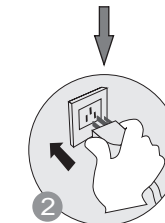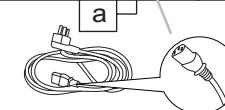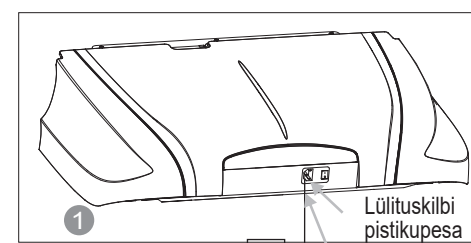

4 Tooli algasend

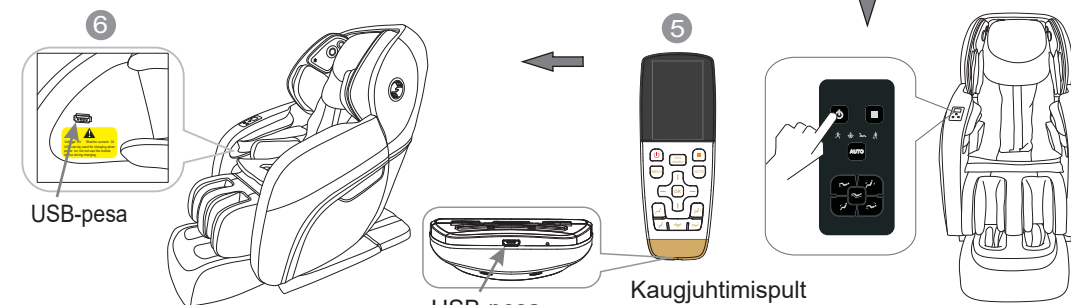

## Paigalduskoht

**Ettevaatust**

Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini lähedal või vannitoas.




Tooli polstri hea seisukorra säilimiseks ärge kasutage tooli otsese päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.




Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või muid ettenägematuid probleeme.

**Kontrollige alasid tooli ees ja taga**

Jalatuge ette ja seljatuge alla lükates kontrollige, et tooli lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

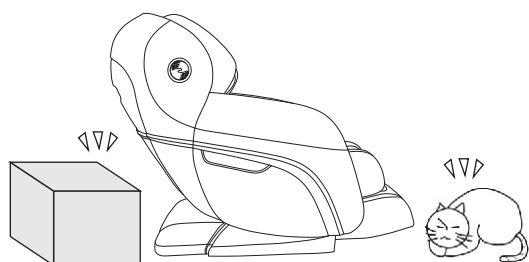**Kontrollige toitejuhet ja pistikut**


- (1) Puhastage pistikult regulaarselt tolmu, kasutades selleks kuiva lappi.
- (2) Toitejuhet ei tohi kahjustada, modifitseerida, painutada, venitada, sõlme siduda ega jätta seda raske eseme (eriti tooli) alla.

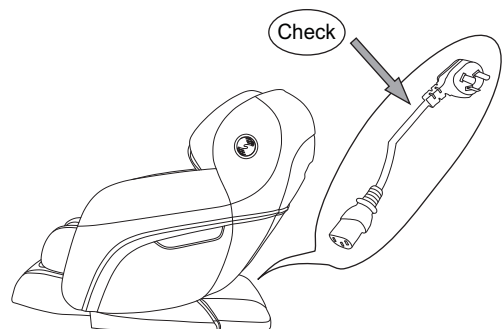

## Kontrollige paigalduskohta

**● Tooli jaoks vajaminev ruum**

- Vähemalt 10cm seinast.

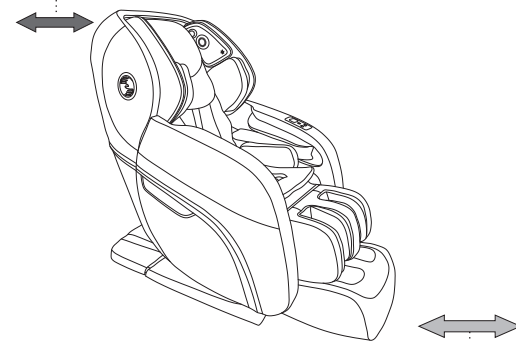


- Vähemalt 50 cm jalatoest ettepoole.

**● Kontrollige ümbrust**

Kui seljatugi alla laskub ja jalatugi üles tõuseb, kontrollige järgmist:

- (1) tooli ümber ei tohi olla inimesi ega esemeid.
- (2) toolil peab olema piisavalt ruumi liikuda.

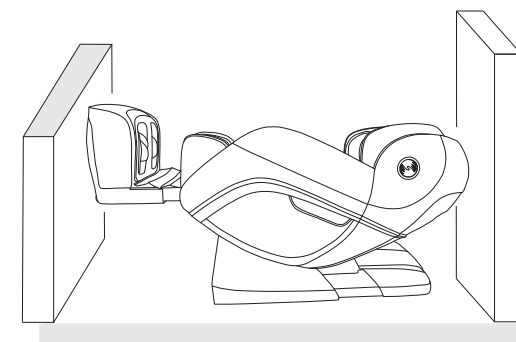

## Massaažitooli liigutamine

**Ettevaatust**


- ✦ Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi massaažitooli töötamise ajal liigutada.

**Massaažitooli liigutamine**

- ✦ Siduge juhtmed kokku ja asetage need istmele, et need tooli liigutamise käigus kahjustada ei saaks.
- ✦ Järsud liigutused või kukkumine võivad tooli sisemisi komponente kahjustada.
- ✦ Ärge kasutage tooli liigutamiseks ratast, kui tool asub puitpõrandal või muul kergesti kahjustuval pinnal. Tooli tõstmiseks on vaja kahte või enam inimest.
- ✦ Veenduge, et tooli toide on välja lülitatud, pistik seinakontaktist välja tõmmatud ja ei puuduta põrandat. Kõige parem on tooli tõsta siis, kui see on istesendis, nii ei ole ohtu, et seljatugi vastu maad kukub.

**Normally**

- 1 Suruge tooli peaosa alla, nii et tool vajub jalaste tagaosas asuvatele ratastele. Seejärel lükake tool soovitud kohta ja asetage see ettevaatlikult tagasi maha.

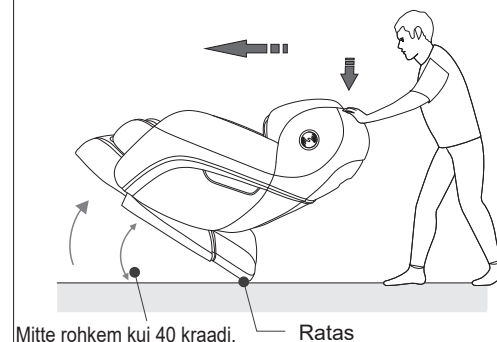


Selleks et vältida kriimustuste tekkimist kunstnahale, hoidke tooli liigutamiseks jalatuge (vt pilti).

Kui seljatugi on massaaži ajal alla lastud, siis käetuge liigutada ei saa.

## Seadistamine enne massaaži

**● Enne massaaži**

- ✦ Veenduge, et massaažirullikud tooli seljatoe ülaosas on peatunud, seejärel istuge aeglaselt tooli.

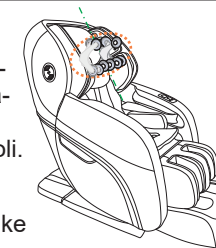


- ✦ Massaažipunkti vales asendist tingitud võimalike vigastuste vältimiseks.

- ✦ Kui massaažipunkt nõelravi punktidektori kasutamisel õlgade asendit tuvastada ei suuda, liigub see vaikimisi seljatoe keskosasse.

**Õige asend: selg toetub tooli seljatoele, pea padjale.**


Kui keha skaneerimine algab, kostub kaugjuhtimispuldilist üks helisignaali. Kui kuulete puldist tulevat helisignaali, saate üles-alla noole abil õlgade asendit manuaalselt reguleerida.

- ✦ Vältige õlgade asendi vale tuvastamist, kuna see mõjutab teostatava massaaži mugavust.

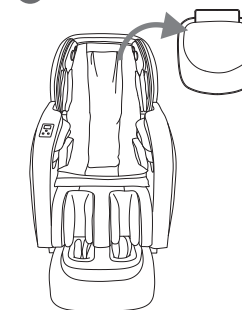
**● Soovitus**

- Kui tunnete, et massaaž ei ole piisavalt tugev, võite eemaldada padja ja õlapadja.

- Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda rikkuda. Asetage põranda kaitseks maha tekk või muu pehme ese.

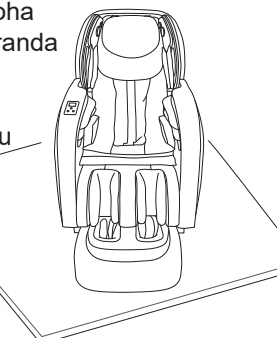

## Manuaalne juhtimine

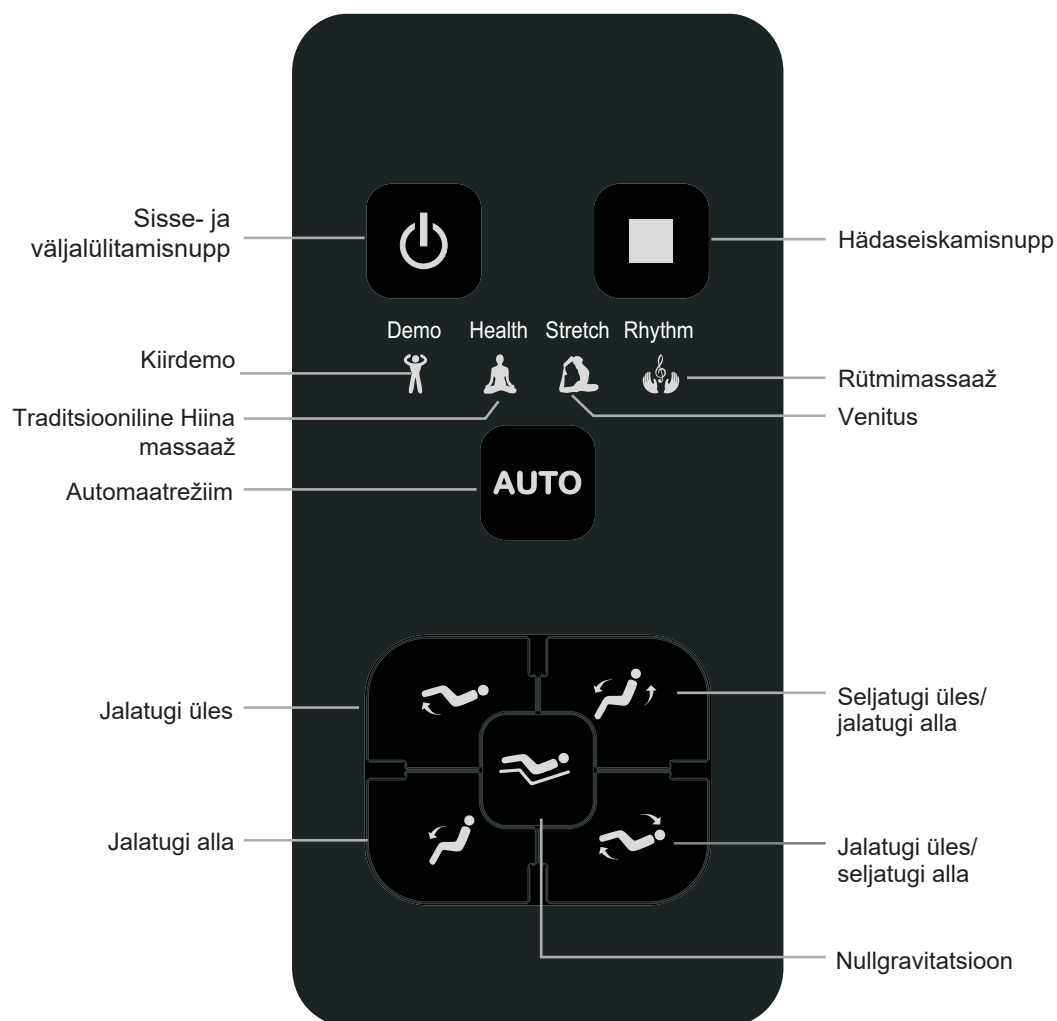

1. Ooterežiimis olles vajutage tooli sisselülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF. Seejärel valige menüüst või massaažinuppude abil soovitud programm. Tooli väljalülitamiseks vajutage jälle sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, misjärel massaažitool lülitub välja ja massaažirullikud naasevad algasendisse, jalatugi liigub alla ja seljatugi üles püstiasendisse.



2. Vajutage seda nuppu kõigi massaažitoimingute lõpetamiseks – pärast seda ei saa puldi teisi nuppe enam kasutada. Puldi sisselülitamiseks peate vajutama



3. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et muuta või valida

- ① kiirdemo: süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 8 minutit.
- ② traditsiooniline: süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.
- ③ venitus: süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.
- ④ Rütmimassaaž: süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.



4. Selle nupu allhoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.



5. Selle nupu allhoidmisel liigub seljatugi üles ja jalatugi alla, nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.



6. Selle nupu allhoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.




7. Selle nupu allhoidmisel liigub seljatugi alla ja jalatugi üles, nupu vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.



8. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu üks kord, et viia tool nullgravitatsiooni esimesse asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel liigub tool nullgravitatsiooni teise asendisse. Nupu vajutamisel kolmandat korda liigub tool unerežiimi. Nupu vajutamisel neljandat korda liigub tool tagasi istuvasse asendisse. Seejärel algab tsükkel otsast peale.

## Manuaalne juhtimine

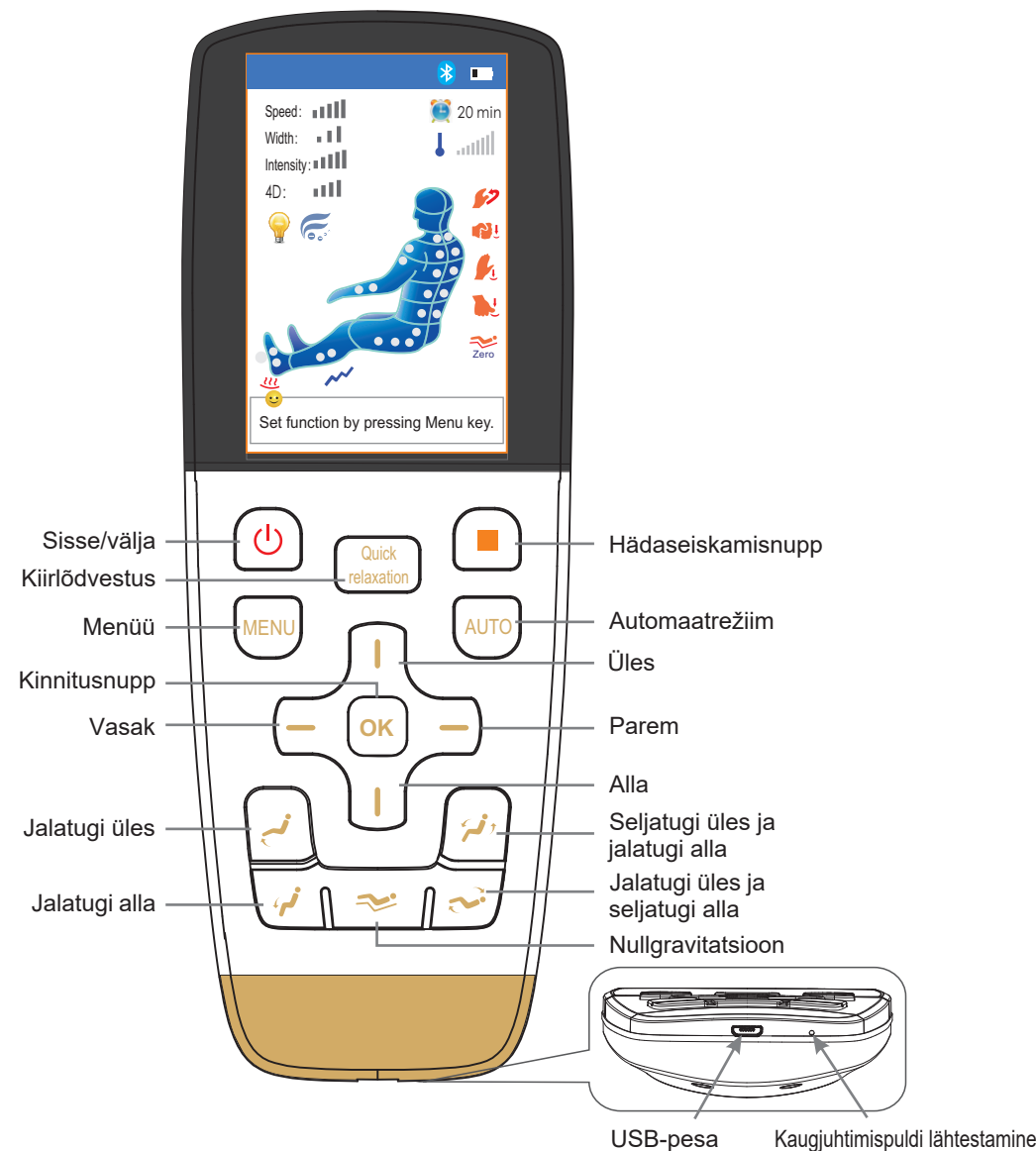

Massaaž

### ● Kaugjuhtimispuldi esmakordne sidumine Bluetoothiga

1. Lülitage massaažitool lülitist sisse, kaugjuhtimispult tuleb pärast algseadistamist suunata lülituskilbi parema ülemise nurga suunas. Hoidke 4 sekundi vältel all nuppe MENU + OK, ekraanile kuvatakse Bluetoothiga sidumise märk.
2. Kui sidumine on edukas, kuvatakse ekraani ülaosasse Bluetoothi märk.
3. Pärast edukat sidumist lülitage palun pult välja ja uuesti sisse, misjärel saate massaažitooli kaugjuhtimispuldilt juhtida.
4. Kui puldi järgmine kord sisse lülitate, seob pult end Bluetooth funktsiooniga automaatselt.

**Märkus.** Tavaliselt seadistatakse tool teile tarnimisel, kuid kui puldi Bluetooth funktsioon pärast puldi algseadistamist ei toimi, järgige palun eespool toodud samme Bluetoothi sidumiseks. Kui pult sisse ei lülitu või kui patareid on tühjad, laadige pulti tooliga kaasas oleva USB-juhtmega.

### ● Kaugjuhtimispuldi lähtestamine

Kui kaugjuhtimispuldi ekraan hangub, leidke terav ese, millega puldi lähtestamiseks vajutada puldi lähtestamisavasse.



1. Kui tooli toitejuhe on vooluvõrku ühendatud, vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu vähemalt 4 sekundit ja tool lülitub sisse. Samal ajal süttib puldil Bluetooth märgutuli, misjärel saate valida menüüst või nuppude abil automaatse või manuaalse massaažiprogrammi, pärast mida toimub keha skaneerimine ja massaaž algab. Tooli välja lülitamiseks vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu 4 sekundit, massaažitool peatub ja lülitub välja, tooli seljaosa massaažiseade liigub algasendisse, jala-tugi liigub alla ja seljatugi üles ning kaugjuhtimispult lülitub 3–5 sekundi pärast välja.



2. Vajutage seda nuppu kiirlõdvestusprogrammi käivitamiseks, programmi olek kuvatakse ekraanile. Vaikimisi tööaeg on 8 minutit.




3. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu kõikide funktsioonide peatamiseks. Ühtegi teist nuppu pärast selle nupu kasutamist enam kasutada ei saa. Kaugjuhtimispuldi sisse lülitamiseks ja massaaži jätkamiseks vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu.



4. Põhirežiimis olles vajutage seda nuppu, et liikuda menüüsse, kus kasutaja saab valida massaažitooli erinevate funktsioonide vahel. Põhirežiimi naasmiseks vajutage nuppu MENU uuesti.



5. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu automaatprogrammi valimiseks. Toolil on kuus automaatset massaažiprogrammi: taastav massaaž, leevendav massaaž, venitus, ergutav massaaž, muusikaga sünkroniseeritud massaaž ja rahustav massaaž. Valitud programmi ikoon kuvatakse puldi ekraani ülaosasse.

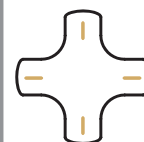

6. Puldil on neli navigatsiooninuppu: üles, alla, vasakule ja paremale. Menüürežiimis olles saab navigatsiooninuppudega menüüs kiirelt ülemisi ja alumisi menüüpunkte valida. Manuaalrežiimis saab üles-alla nuppe kasutada massaažiseadme asendi kohandamiseks ölakõrguse tuvastamise ajal ning kindla kehapunkti massaaži ajal.



7. Kui tool on sisse lülitatud ja menüürežiimis, vajutage seda nuppu, et kinnitada menüüpunkti valik ja siseneda alammenüüsse. Põhiekraanil olles vajutage seda nuppu ioniseerimisfunktsiooni sisse lülitamiseks. Nupu teistkordsel vajutamisel lülitub ioniseerimisfunktsioon välja.



8. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoo liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.



9. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi üles ja jalatugi liigub alla, nupu vabastamisel seljatoo ja jalatoo liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.



10. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoo liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.



11. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi alla ja jalatugi liigub üles, nupu vabastamisel seljatoo ja jalatoo liikumine peatub. Istumisasendi reguleerimisel kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.



12. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu üks kord, et viia tool nullgravitatsiooni esimesse asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel liigub tool nullgravitatsiooni teise asendisse. Nupu vajutamisel kolmandat korda liigub tool unerežiimi. Nupu vajutamisel neljandat korda liigub tool tagasi istuvasse asendisse. Seejärel algab tsükkel otsast peale.

Massaaž

## LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

## Põhiekraan



Vajutades sisse- ja väljalülitamisnuppu siis, kui tool on sisse lülitatud, kuulete ühte lühikest ja järsku helisignaali. LCD-ekraanile kuvatakse pärast 2–3-sekundilist käivitusfaasi põhiekraan ja tool läheb ooterežiimi. Põhiekraanil kuvatakse massaaži asend, meetod, aeg, programmi olek jne – kogu info ajakohastatakse siis, kui tool tööle hakkab.

**Massaažiprogramm**

- Muljumine
- Õrnem koputus
- Tugevam koputus
- Shiatsu
- Nulgravitatsioon
- Zero
- Allesjäänud massaaži aeg



## Massaažiasend

Massaaži kiirus (1., 2., 3., 4. ja 5. tase)  
 Oleku kuvamine Massaaži laius (kitsas, keskmine, lai)  
 Öhusurve intensiivsus (1., 2., 3., 4. ja 5. tase)  
 Oleku kuvamine 4D (1., 2., 3., 4. ja 5. tase)

Temperatuur Massaaži-seadme soojenduse aste

Soojendus

Käetoet LED-tule olek

Ioniseerimis-funktsiooni märk


Jalgade muljumise märk

## Menüüliides




Vajutage põhiekraanil olles nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile menüü, kust kasutaja saab valida soovitud massaaži programmi. Menüüst väljumiseks vajutage menüüekraanil olles uuesti nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile põhiekraan.

**Automaatrežiim:** vajutage nuppu MENU, seejärel valige soovitud automaatrežiim (taastav, leevendav, venitus, muusikaga sünkroniseerimine, ergutav, rahustav või erimassaaž) ja vajutage nuppu OK. Erimassaaži all on kus valikut: värskendav, energiat andev, virgutav, aktiivne, lõdvestav, turgutav.

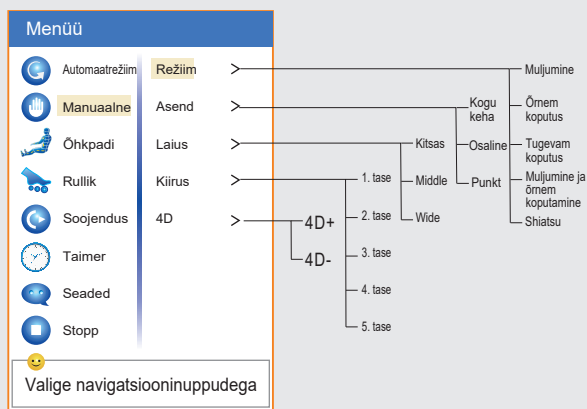

**Manuaalrežiim:** vajutage menüünuppu MENU, valige navigatsiooninuppude abil viie valiku vahelt soovitud seaded: programm, asend, laius, kiirus, 4D. Valige soovitud seadistus ja vajutage nuppu OK, et siseneda alammenüüsse. Massaaži programmid on järgmised: muljumine, õrnem koputus, tugevam koputus, muljumine ja õrnem koputus ning shiatsu. Asendite hulgast saab valida kogu keha, osalise või punktmassaaži vahel.

## LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

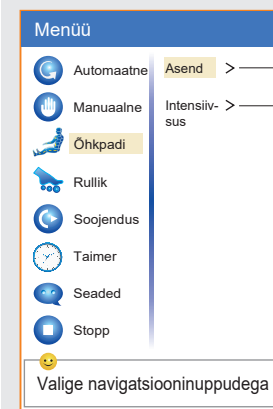

**Ohkpadjamassaaž:** pärast menüünuppu MENU vajutamist valige navigatsiooninuppude abil valik „Ohkpad“ ja vajutage nuppu OK. Ohkpadidel saab reguleerida asendit ja intensiivsust. Valige soovitud funktsioon ja vajutage nuppu OK, et liikuda alammenüüsse ja valida massaažiasend (kogu keha, ülakeha, vöökoht ja istmik, jalad ja jalgalaab). Massaaži tugevust saab valida 5 tugevusastme vahel.

**Jalarullik:** vajutage nuppu MENU ja valige navigatsiooninuppudega valik „Rullik“. Valikute „Kiire“, „Õrn“ või „Stopp“ valimiseks vajutage nuppu OK.

**Soojendus:** Vajutage nuppu MENU, valige navigatsiooninuppudega valik „Soojendus“, vajutage nuppu OK, valige soojendusfunktsioon (Selg SEES, Jalalabad SEES, TEMP+ või TEMP-).



**Taimer:** vajutage nuppu MENU, valige navigatsiooninuppudega valida massaaži kestuse: 10, 20 või 30 minutit. Vaikimisi seadistuseks on 20 minutit, pärast mida tool automaatselt välja lülitub.

**Seaded:** Vajutage nuppu MENU, seejärel valige navigatsiooninuppude abil valik „Seaded“, mille all saate valida keele või LED-tulede sisse- ja väljalülitamise.


**Stopp:** vajutage menüünuppu MENU, valige navigatsiooninuppude abil valik „Stopp“, misjärel massaaži programm peatub ja puldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

Kui tool on sisse lülitatud, siis automaatprogrammi esmakordsel kasutamisel hakkab tool keha skaneerima ja ekraanile kuvatakse teade „Keha skaneerimine...“. Kui keha skaneerimine on lõpetatud, kostub 5

helisignaali (üks iga sekundi kohta). Sellel hetkel on massaažirullikud õlgade juures ning kasutaja saab neid üles-alla navigatsiooninuppude abil endale sobivaks kohandada. Kohandamise ajal kuvatakse puldi ekraanile teade „Õlgade kõrguse reguleerimine...“. Vaikimisi tööajaks on määratud 20 minutit. Pärast massaaži lõppemist lülitub tool välja ja liigub tagasi algasendisse.

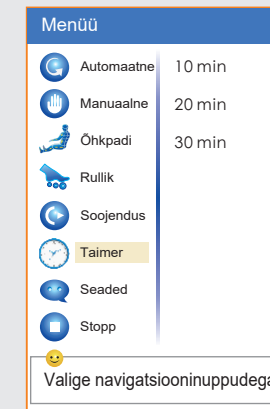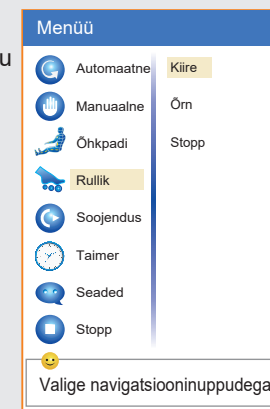

## Sisse- ja väljalülitamine

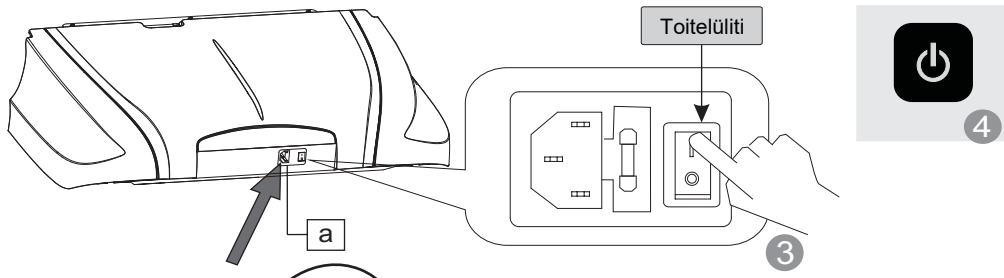

Toitelüliti

1

2

3

4

a

**1. Toite sisselülitamine**

- 1 Sisestage toitejuhtme üks ots pistikusse „a“.
- 2 Sisestage toitejuhtme pistik seinakontakti.
- 3 Lülitage massaažitool lülituskilbil olevast toitelülitist sisse.
- 4 Vajutage juhtimispuul sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF (puuldist kostub üks helisignaali). Puuldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

**2. Massaaž**

- 1 Kasutage vastavalt puuldi kasutusjuhendile. Massaažiprogrammide kohta leiate rohkem infot kaugjuhtimispuuldi kasutusjuhiste alt.
- 2 Massaaži lõppedes liigub massaažiseade algasendisse ja kaugjuhtimispuuldi ekraanile kuvatakse teade „Väljalülitamine“.

Juhtimispaneel Kaugjuhtimispuuldi

**3. Toite väljalülitamine**

- 1 Kui tooli toide on sisse lülitatud, vajutage tooli väljalülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu, misjärel tool liigub automaatselt algasendisse.
- 2 Kui tooli rullikud on liikunud algasendisse, lülitage tool selle taga- ja allosas olevast toitelülitist välja.
- 3 Tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja.



Hoiatus

1. Enne kasutamist tõmmake padjad üles, et kontrollida, et polüuretaanist kate oleks terve. Kahjustuste korral ärge tooli kasutage, tõmmake selle toitepistik seinast ja laske kate ära parandada.
2. Sisestage tooli toitepistik ainult nõuetekohasesse seinakontakti.



Tähelepanu

1. Enne tooli istumist veenduge, et käe-, jala- ja seljatoe ning tooli istumisosa vahel ei oleks esemeid.
2. Jalatoel on ohutusseade: kui jala ja jalalaba vahel on takistus, peatub jalatoe sissetõmbumine automaatselt.
3. Enne tooli kasutamist veenduge, et tool on lähtestatud olekus.
4. Massaažitooli kasutamise ajal ärge seiske toolil püsti.

## Funktsioonide pildid


## ● Jalatugi üles

Selle nupu vajutamisel liigub jalatugi üles. Nupu vabastades jalatugi peatub ja jalatoe nurk lukustub fikseeritud asendisse.



## ● Jalatugi alla

Selle nupu vajutamisel liigub jalatugi alla. Nupu vabastades jalatugi peatub ja jalatoe nurk lukustub fikseeritud asendisse.

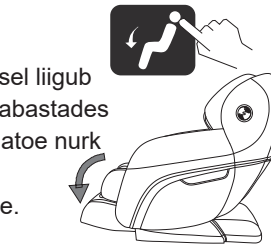

## ● Jalatugi üles ja seljatugi alla

Kui vajutate juhtimispuuldi seda nuppu, liigub seljatugi alla ja jalatugi üles. Nupu vabastamisel selja- ja jalatugi peatuvad ning nende kaldenurgad lukustatakse fikseeritud asendisse.




## ● Seljatugi üles ja jalatugi alla

Selle nupu vajutamisel liigub seljatugi üles ja jalatugi alla. Nupu vabastamisel seljatugi ja jalatugi peatuvad ning nende kaldenurk lukustatakse fikseeritud asendisse.




## ● Jalatoe pikendamine ja lühendamine

Jalatuge saab automaatselt pikendada ja lühendada 22 cm ulatuses.

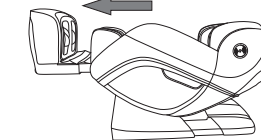


## ● Nullgravitatsioon

Selle nupu vajutamisel liigub seljatugi alla ja jalatugi tõuseb üles. Nii liigub tool mugavasse nullgravitatsiooni asendisse. Nupu eistkordisel vajutamisel liigub tool magamisasendisse. Nupu vajutamisel kolmandat korda liigub tool algasendisse. Seljatugi tõuseb üles ja jalatugi liigub alla.

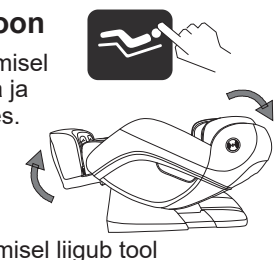

## ★ Soovitused.

Nullgravitatsiooni asend on välja töötatud NASA kosmosekapsli eeskujul, kus selja, istme ja jalatoe kolme osa nurka saab muuta, nii et jalatugi liigub üles ja iste alla, jättes keha ja jalgade vahele 128-kraadise (+/-7 kraadi) nurga. Nii asetsevad süda ja põlved samal tasemel, viies vereringe surve miinimumini ning kogu keharaskuse tuharatele. Tänu nullgravitatsiooni asendi disainile jaotub kogu raskusjõud massaažitoolile, vähendades survet südamele ja selgroole, mistõttu saab selles asendis parima massaažielamuse, kuna kasutaja keha on täiesti lõdvestunud, loomulikus ja mugavas asendis.

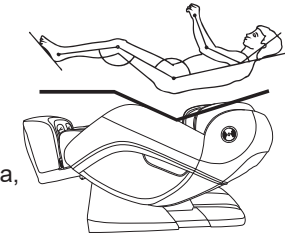

## ● Uue kurviline disainiga rööbas, kombineeritud selja ja tuharate massaaž

Massaažitoolil on 4D kurviline disainiga rööpatehnoloogia, mis koos patenteeritud 4D massaažiseadmega võimaldab pakkuda integreeritud, mitme nurga alt teostatavat selja- ja tuhamassaaži. Selle tooli puhul on liigutatud edasi tavalisest L-kujulisest rööpast, mis ei võimalda täis- lamavasse asendisse liikumist ega venitust, ning mille tulemusena on saavutatud parim massaažiefekt.




1. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks veenduge, et seljatoe taga ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.
2. Seljatoe reguleerimisel jälgige selja- ja käetoet vahelist vahet.
3. Kui jalatugi liigub, ärge seiske toolil ega lahkuge sellelt. Kui jalatoe liikumine põhjustab toolile kahjustusi, ärge püüdke selle liikumist takistada.
4. Rohkem infot leiate juhtimispuuldi kasutusjuhistest.

## Funktsioonide pildid


## ● Käte massaaž

Massaažitoolil on kosmosekapsli toolist inspireeritud käetugi, millel on sisseehitatud pulseeriva õhusurvega assaažifunktsioon. Asetage käed käetoet õhkpadjade vahele. Pärast seda, kui õhkpadjad on õhuga täitunud, saate nautida käsivarte ja käelabade muljumismassaaži. Käte mugavat massaaži saab teostada tooli mistahes nurga korral.

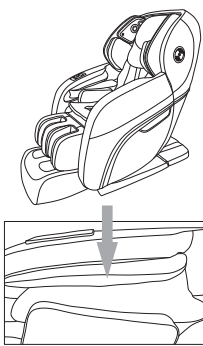


## ● Õlamassaaž

Venitusfunktsiooni tarbeks asuvad mõlema õla piirkonnas mitmekihilised õhkpadjad. 4D massaažirullikud lükkavad keha edasi, samal ajal kui õhkpadjad toetavad õlgu, et tagada keha mõnus venitamine.

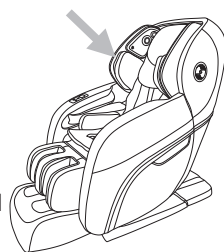


## ● Jalgade muljumise funktsioon

Uudne jalgade muljumise tehnoloogia võimaldab jalalihastele pakkuda muljumis- ja hõõrumismassaaži, mis aitab tõhusalt leevendada jalavalu ja taastada jalgade elujõu.

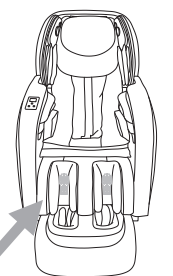


## ● Jalalabade soojendusteraapia

Uuenduslik kahe-suunaline jalalabade muljumistehnika, mis koos soojendusfunktsiooniga taastab jalatala funktsioone ning pakub parima ja tervist taastava massaažielamuse.

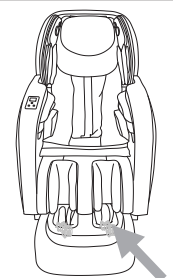


## ● Ioniseerimisfunktsioon

Toolil on ionisaatori õhupuhastustehnoloogia, mis püüab õhust kinni kahjulikud osakesed ning puhastab seeläbi õhku. See võib tuua ka parema une, soodustada ainevahetust, tõsta organismi vastupanuvõimet, omada steriliseerivat mõju jne.

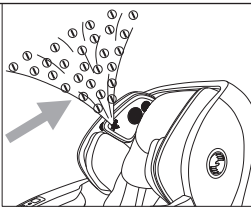


## ● Muusikaterapia

Toolil peatoet sees on mitu kõlarit. Bluetooth-pleier integreerib muusika valitud massaažitehnikaga, tagades sünkroniseeritud teraapia – massaažirullikud liiguvad vastavalt muusika rütmile. Enda valitud muusika saatel lõdvestumine parandab vereringet ja leevendab väsimust.

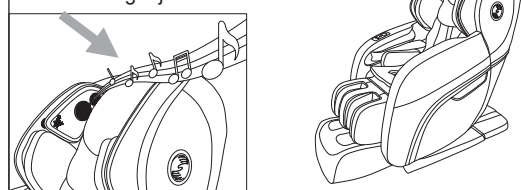

## ● Hääljuhtimine

Hääljuhtimise kasutamiseks peate esmalt ütlema käsu: „Lülita hääljuhtimine sisse“, misjärel tuvastab tool teie edasised käsud. Pärast seda, kui tool on teie käsu õigesti tuvastanud, kuulete kõlaritest vastavat kinnitust. Käsud ja vastused on järgmised:

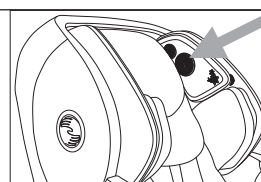


Käsklus	Kinnitus
Lülita hääljuhtimine sisse	Hääljuhtimine on sisse lülitatud
Hiina massaaž	Hiina massaaž on valitud
Valu leevendamine	Valu leevendamine on valitud
Venitus	Venitus on valitud
Kogemus	Kogemus on valitud
Lõdvestus	Lõdvestus on valitud
Nullgravitatsioon	Nullgravitatsioon
Lülita hääljuhtimine välja	Hääljuhtimine on välja lülitatud
Lülita massaažitool välja	Massaažitool lülitub välja

## Tähelepanu!

- Hääljuhtimise väljalülitamiseks öelge „Lülita hääljuhtimine välja“ ja „Lülita massaažitool välja“. Kui tahate tooli taas sisse lülitada, öelge „Lülita hääljuhtimine sisse“.
- Pärast häälkäskluse aktiveerimist kostub kõlarist 1 sekundi pärast kinnitus, pärast mida võite öelda järgmise käsu.
- Pärast hääljuhtimise sisselülitamist on massaažitooli vaikimisi 3 minutit uue käskluse ootel. Pärast 3 minutit lülitub hääljuhtimisfunktsioon välja. Kui soovite seda uuesti käivitada, öelge uuesti „Lülita hääljuhtimine sisse“.
- Kasutage standardkeelt, rääkige rahulikult.

## Massaažitooli kasutamise lõpetamisel


- Veenduge, et selja- ja jalatoet lähedal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

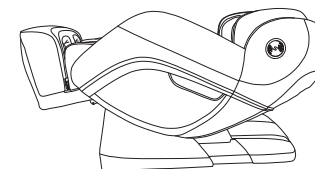


- Liigutage puldi abil tooli selja- ja jalatugi algasendisse. (Või vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu, et selja- ja jalatugi liiguksid ise algasendisse.)




- Pärast seda, kui tool liigub tagasi algasendisse, pange pult vasakul käetoel olevasse juhtimis-puldi kotti.

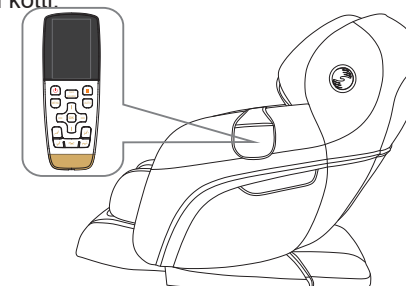

- Toolist üles tõustes hoidke kahe käega käetugedest kinni ja tõuske aeglaselt püsti, tõstke jalad jalatoest välja ja toetuge tõustes kahe jalaga kindlalt maa peale. Pange seljatoet padi ja peatugi tagasi algseesse asendisse.

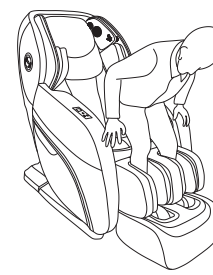


✓ Õige

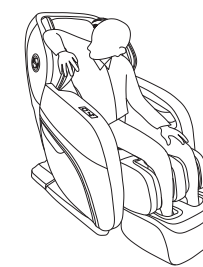


✗ Vale

- Lülitage toide välja.

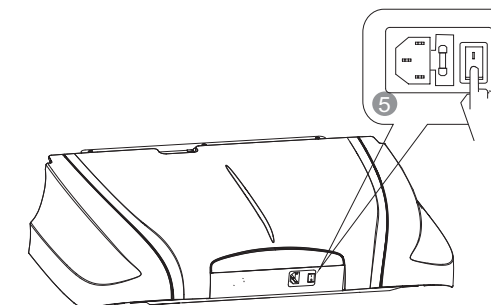

- Tõmmake pistik seinakontaktist välja. (Tähelepanu! Jälgige, et pistik oleks otse.)

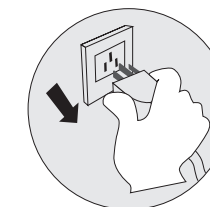

- Puhastage tooli vastavalt vajadusele.



## Tähelepanu!

- Pärast kasutamise lõpetamist vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, et lõpetada kõik massaažitoimingud ja laske toolil liikuda tagasi algasendisse.
- Veenduge, et tool on vooluvõrgust lahti ühendatud, et vältida võimalike vigastuste teket lastele või lemmikloomadele.
- Pärast tooli kasutamise lõpetamist lülitage toide välja ja tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja. Vältige niiskust ja mustuse kogunemist ning vananenud isolatsiooni kasutamist, kuna need võivad põhjustada toolile kahjustusi.

## Kunstnahk

## Üldpuhastus


- Puhastage kergelt lapiga, mis on puhas, pehme ja kuiv.



(Kemikaalide või meditsiiniliste puhastusvahendite kasutamine on keelatud.)



Forbidden

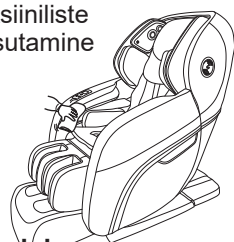

## Kui kunstnahk määdub

- Kastke pehme lapp 3–5-protsendilisse neutraalse puhastusvahendi lahusesse, väänake kuivaks ja puhastage pind.
- Seejärel peske lapp puhta veega puhtaks, väänake välja ja pühkige puhastusvahend pinnalt niiske lapiga ära.



- Puhastage õrnalt kuiva lapiga.
- Laske kuivada (fööni kasutamine kuivatamiseks on keelatud).

## Lapi materjal

- Kastke lapp neutraalse puhastusvahendi lahjasse lahusesse, väänake kuivaks ja puhastage pind.

- (Lahusti, bensiini ja alkoholi kasutamine puhastamiseks on keelatud.) Pühkige määdunud kohad lahja neutraalse puhastusvahendi lahusega puhtaks (vältige liigset niiskimist).

- Liigne puhastamine võib tooli pinda kahjustada.
- Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga puhtaks.
- Laske kuivada.

## Plastosad

- Kastke lapp neutraalsesse puhastusvahendisse, väänake kuivaks ja puhastage pind.
- Pühkige pind puhta veega niisutatud lapiga.
- Laske kuivada.




## Juhtimispuhasti puhastamine

- Pigistage pehme lapp kuivaks ja pühkige pult puhtaks.

- Laske kuivada. Kütuse, lahusti või alkoholi kasutamine puhastamiseks on keelatud.



Forbidden

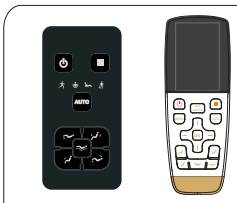

Kaugjuhtimispuhasti



## Puhastamisest

- Enne tooli puhastamist eemaldage tooli toitejuhe voluvõrgust, ärge katsuge pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et toitepistikut seinakontakti lükates on teie käed kuivad.
- Eespool nimetatud juhiste mittejärgimisel võib tagajärjeks olla elektrilöökk või põletus.

## KKK ja veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Veaotsing
Massaažitool ei hakka tööle, kuigi on sisse lülitatud.	Kontrollige, kas juhtimispuhasti on sisse lülitatud või mitte.	Lülitage pult sisse.
	Massaažiprogramm ei ole valitud.	Valige massaažiprogramm.
	Kehv ühendus pistiku ja seinakontakti vahel.	Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Juhe või pistik on kahjustunud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
	Kaitse on läbi põlenud.	Asendage kaitse sama väärtusega kaitsmega.
Massaažiseadme tuleb töötamise ajal helisignaali.	Sisemise vooluringi viga.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
	Tegemist on õhkpumba, mootori või mehaaniliste osade signaaliga.	Tavapärane signaal, mida võib eirata.
Vasak ja parem rullik on erineval kõrgusel.	Massaažirullikud töötavad kordamööda.	Tavapärane olukord, mida võib eirata.
Heli muutub töötamise ajal äkki valjemaks.	Tegemist võib olla liiga pika tööajaga.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Toolsisemised komponendid on pika tööaja tõttu paigast nihkunud. Tegemist on tavapärase nähtusega.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Massaažiprogramm peatub ootamatult töötamise ajal.	Elektritoite äkiline kadumine.	Lülitage seade uuesti sisse.
	Ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Ei seljatugi ega jalatugi ei liigu alla.	Kontrollige, et selja- ja jalatoe ümbruses ei oleks takistusi; tool on üle koormatud; ohutuse tõttu peatub massaažitool sellistes olukordades automaatselt.	Eemaldage takistused; lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
Tool ei liigu algasendisse.	Liiga pikk tööperiood; ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis saanud.	Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või volitatud remonditehnik.
Toitejuhe või pistik on kuumad.	Võimalik ülekoormus.	Lülitage tooli toide välja, et seade saaks enne järgmist tööperioodi vähemalt pool tundi puhata.
	Muu ebatavaline põhjus.	Lõpetage tooli kasutamine ning kutsuge probleemi lahendamiseks appi volitatud hooldustehnik.



Märkus. Kui probleemide põhjuseks ei ole eespool toodud põhjused, lülitage tooli toide välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. Seejärel võtke tooli parandamiseks ühendust tootja või volitatud hooldustehnikuga.



## Tehnilised andmed

Nimi	Massaažitool	Võimsus	280W
Mudel	AL-8900S	Netokaal/ brutokaal	Korpus: 100/121 kg Käetugi: 14,8/19 kg Jalatugi: 31,5/35,5 kg
Sisendpinge	<input type="checkbox"/> AC120V, 60Hz <input type="checkbox"/> AC220V, 50/60Hz <input type="checkbox"/> AC240V, 50Hz		Pakendi mõõtmed
Ohutusklass	Klass I		